



コンタクトレンズ装着薬

【CMプラスネオ】

15mL

## CMプラスネオ使用説明書

(販売名:CMフィットVI)

コンタクトレンズ装着薬

指定医薬部外品

- 使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容等でわからないことがあれば必ず眼科医に相談し、よく確認してからご使用ください。
- 使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医に相談してください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

### 使用方法の遵守に関する事項

使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

### CMプラスネオの特徴

#### 1. 「うるおいのベール」

水分保持能力の高い成分「ヒプロメロース」と「ポリビニルアルコール」がレンズ表面に“うるおいのベール”をつくり、レンズ装着時の異物感や刺激、乾燥を抑え、容易なレンズ装着を可能にします。またレンズへの汚れの吸着を抑えることが期待されます。

#### 2. アミノ酸成分をダブルで配合

「タウリン」と「アスパラギン酸カリウム」の2種類のアミノ酸成分が角膜の新陳代謝を促進し、瞳の健康をサポートします。

#### 3. 「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」配合

眼粘膜に作用し、角膜表層の保護に役立つ成分で、粘稠化剤として配合されています。また水分保持効果が高く、なめらかなレンズの装着感が期待されます。

#### 4. すべてのコンタクトレンズに使用可能

使い捨て、ソフト、O<sub>2</sub>、ハード、すべてのコンタクトレンズに使用できます。

## 使用上の注意

- 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。  
はげしい目の痛み
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この使用説明書を持って医師または薬剤師に相談すること。  
使用后、次の症状があらわれた場合

関連部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

## 効能効果

ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする。

## 用法用量

本剤の1～3滴で、コンタクトレンズの両面をぬらして装着すること。

## 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4) 用法・用量を厳守すること。

## 成分 1mL中

有効成分:ポリビニルアルコール(部分けん化物)…10mg、ヒプロメロース…6mg、  
塩化ナトリウム…2mg、タウリン…10mg、L-アスパラギン酸カリウム…1mg  
添加物:ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、  
D-ソルビトール、塩酸ポリヘキサニド

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。

※本剤の容器は、透明フィルムで密封包装されています。  
フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、下記の製造販売元へご連絡ください。

製造販売元  
**株式会社 エイコー**  
名古屋市中村区竹橋町10-17

お客様相談窓口  
 **0120-288-102**  
受付時間/平日(月～金) 9:00～17:30  
<http://www.eiko-contact.com>