


日頃のケアで、ハードレンズの 寿命は変わる!?

寿命は2~3年といわれているハードレンズ。しかし、お手入れの仕方次第では寿命は大きく変わってきます。とくに汚れの蓄積には、要注意。ハードレンズに蓄積した汚れはレンズのくもり、乾き、異物感などのトラブルにつながり、レンズの寿命を短くしてしまいます。

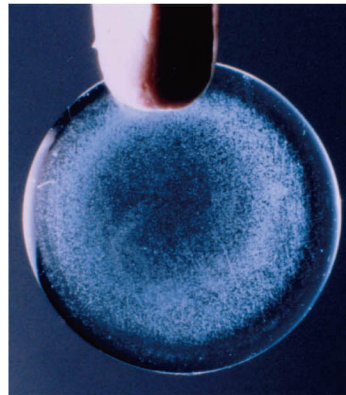

汚れが蓄積したハードレンズ



研磨剤、アルコールを使用していませんので、毎日使っても安心です。

こすり洗いでキレイを保つ!!

ハードコンタクトレンズ専用
こすり洗いクリーナー
8.8mL




キレイって、気持ちいい!

しつこい化粧品などの汚れもスムーズに落とします。

アイライナー



アイシャドー

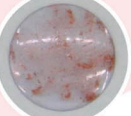

マスカラ



ファンデーション(UV)




チーク



コンシーラー



口紅

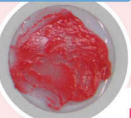

ヘアワックス



日焼け止め



ハンドクリーム



※写真はレンズ表面に人工的に汚れを付着させたものです。

ハードクレンジング 4 つの特徴

- 化粧品などの脂質汚れをスッキリ洗浄。
- 泡立ちやすく、キレイを実感できる。
- 研磨剤、アルコールなしで、レンズにやさしい。
- すべてのハードコンタクトレンズに使用可能。

こすり洗いでキレイを保つ!!



《使い方》



1 レンズにハードクレンジングを4、5滴つけます。



2 指の腹でレンズの表裏をやさしくこすり洗います。



3 レンズの表裏を水道水で十分にすすぎます。

ハードコンタクトレンズ専用
こすり洗いクリーナー

8.8mL

製造販売元

株式会社 **エイコー** ☎0120-288-102

http://www.eiko-contact.com 受付時間/平日(月~金)9:00~17:30

① ケア前の手洗いは忘れずに。レンズケースを定期的に変えてみましょう。眼科で定期的な検査を受けましょう。