

10 minutes Complete!
All in One Care

10分
時短
消毒

ソフトコンタクトレンズ用
洗浄・すすぎ・消毒・保存液

スリムケア 120mL

販売名：ソフトシンブルワン

- 持ち運びに便利な薄型ボトル
- 衛生的な使い切りサイズ
- レンズケース1個付き

ボトルの厚みは
10円玉の大きさと同じ!



▲ボトルを真上から見た図



消毒時間を96%スリム化※

スリムケア 大幅短縮!

一般的な
ケア用品

4時間

※正しいこすり洗いとすすぎが必要です

うるおい成分 W 配合

ヒプロメロース

ポロキサマー

2種類のうるおい成分がレンズの親水性を高め、
水のバリアを作ることで、乾燥や汚れの付着を抑えます。

Size Option

スリムケアアルファ 500mL

- たっぶり使える大型サイズ
- レンズケース2個付き



使用方法

1 洗浄

レンズの両面を
各々20回以上、
ていねいに
こすりながら洗います。




2 すすぎ

レンズの両面を10秒間以上
指先でレンズを
こするようにして
すすぎます。



3 消毒・保存

レンズケースに
スリムケアを満たし、
10分間以上
保存するだけでOK!

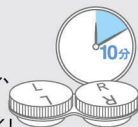

あなたの大切な瞳のために 守っていただきたいこと



手洗い



こすり洗い



すすぎ



液は毎回交換



ケースも洗う



詰め替えない



先端触らない



定期検査

製造販売元

株式会社 エイコー

お客様相談窓口

0120-288-102

受付時間 / 平日(月~金) 9:00~17:30

http://www.eiko-contact.com