

CMプラスクール 15mL

すべてのコンタクトレンズに使用可能です

こんな方にオススメです

! 朝一の装用時に
“シャキッ”としたい! うるおいだけでは
物足りない! 装用時に目の疲れを
感じやすい! 瞳が乾燥しやすく、
装用感がよくない! 夕方になるとレンズが
貼り付いた感じになる

粘度 低 中 高

商品特長

“うるおいベール”で
快適なレンズ装用

水分保持能力の高い水溶性高分子ヒプロメロースとポリビニルアルコールの配合により、レンズ表面に“うるおいのベール”をつくり、快適なレンズ装用を実現します。

レンズ汚れもブロック!

うるおいベールにより、レンズのうるおいを維持することで、涙液中のタンパク質や脂質などの汚れが、レンズに付着しにくくなります。

タウリン+
メントール配合

角膜細胞に栄養を与えるタウリン (アミノエチルスルホン酸)+メントールの爽快感で瞳を元気爽快にします。

タウリン

角膜細胞の新陳代謝を
促進させます。


メントール

すっきりとした清涼感が特徴。

※使用感には個人差がありますので、清涼感の冷感刺激に弱い方はご使用をお控え下さい。

販売名	CMフィットⅢc	
効能・効果	ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする	
成分	有効成分	塩化ナトリウム、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、アミノエチルスルホン酸
	添加物	エデト酸ナトリウム水和物、リン酸二水素カリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、塩化ベンザルコニウム液、ポリソルベート80、l-メントール


使用方法

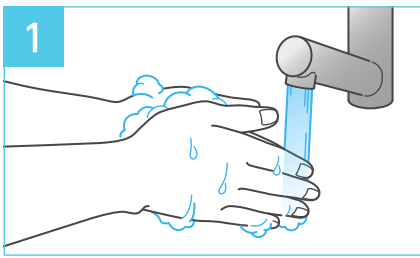

1 石鹸で念入りに手を洗い、水道水でよくすすぎます。



2 コンタクトレンズ装用前に装着薬を1~3滴落とし、両面になじませます。

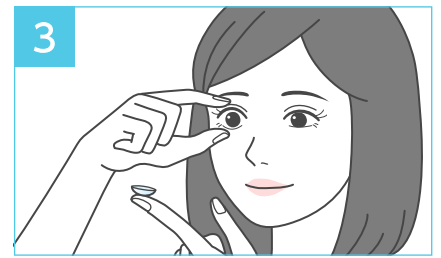


3 コンタクトレンズを装着します。

使用比較

装着薬なし

装着薬あり


うるおい持続と乾き防止

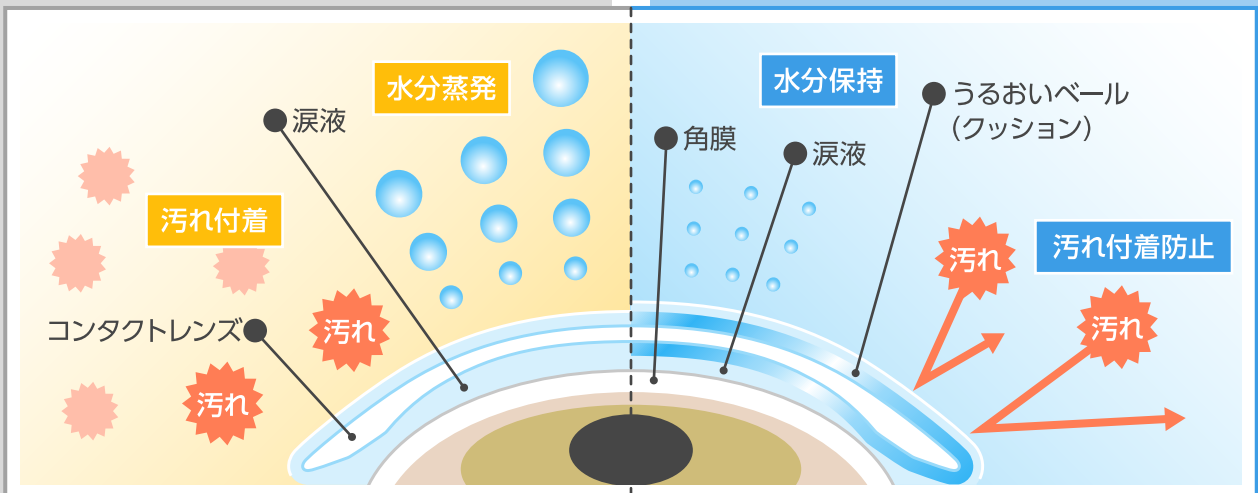

20分空気中に放置



乾燥により、レンズが変形

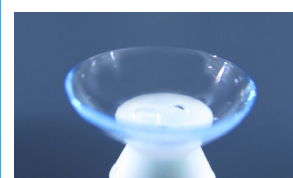


うるおいが持続し、レンズの形状を維持


30分間汚れ液に浸漬

汚れ度：低 高

※汚れを青く染めています。

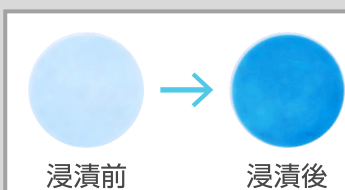

汚れが吸着しています

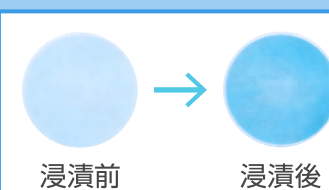

汚れの吸着を抑えます