

CMプラスネオ 15mL

すべてのコンタクトレンズに使用可能です

こんな方にオススメです

! コンタクトレンズを長時間装用する

! 瞳が乾燥しやすく、装用感がよくない

! 夕方になるとレンズが貼り付いた感じになる

! 目薬を頻繁にさしている

! 初めてコンタクトレンズを使用する



粘度 低 中 高

商品特長

“うるおいベール”で快適なレンズ装用

水分保持能力の高い水溶性高分子ヒプロメロースとポリビニルアルコールの配合により、レンズ表面に“うるおいのベール”をつくり、快適なレンズ装用を実現します。

レンズ汚れもブロック!

うるおいベールにより、レンズのうるおいを維持することで、涙液中のタンパク質や脂質などの汚れが、レンズに付着しにくくなります。

2種類のアミノ酸成分+コンドロイチン*配合

*粘稠化剤

瞳の健康をサポートする、2種類のアミノ酸成分(タウリンとアスパラギン酸)配合。また、角膜表層保護に役立つコンドロイチンを粘稠化剤として配合しています。

タウリン

角膜細胞の新陳代謝を促進させます。

アスパラギン酸


細胞の呼吸を促進し、目の疲れを助けます。

コンドロイチン

眼粘膜に作用し、角膜表層の保護に役立ちます。

販売名	CMフィットⅦ	
効能・効果	ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズの装着を容易にする	
成分	有効成分	ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、塩化ナトリウム、タウリン、L-アスパラギン酸カリウム
	添加物	ホウ酸、ホウ砂、エデト酸ナトリウム水和物、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム、D-ソルビトール、塩酸ポリヘキサニド


使用方法

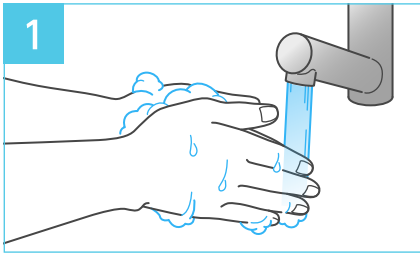

1 石鹸で念入りに手を洗い、水道水でよくすすぎます。



2 コンタクトレンズ装用前に装着薬を1~3滴落とし、両面になじませます。

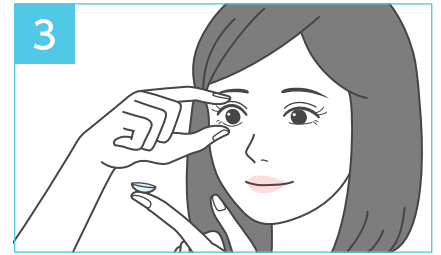


3 コンタクトレンズを装着します。

使用比較


装着薬なし

装着薬あり


うるおい持続と乾き防止

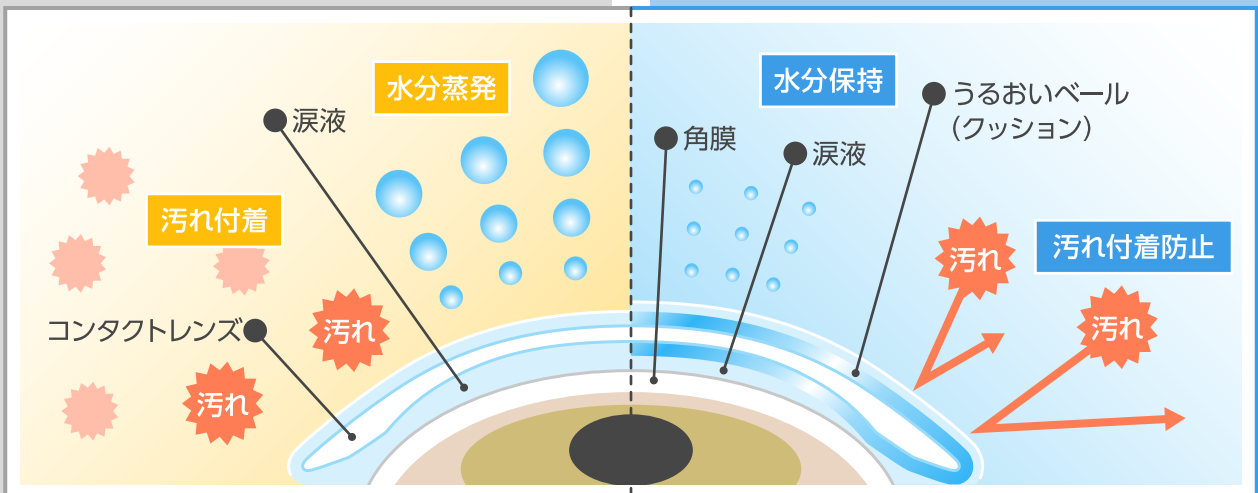

20分空気中に放置

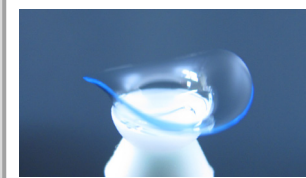

乾燥により、レンズが変形

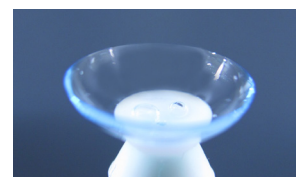


うるおいが持続し、レンズの形状を維持


30分間汚れ液に浸漬

汚れ度：低 高

※汚れを青く染めています。

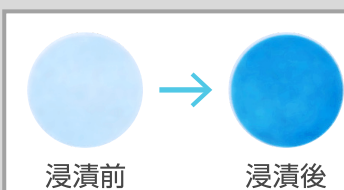

汚れが吸着しています

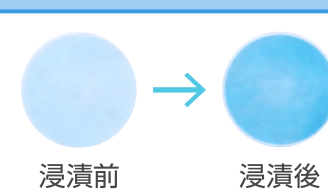

汚れの吸着を抑えます