



# Hard Clear Moist Care

ハードクリアモイストケア

## ハードクリアモイストケア使用説明書

ハード&酸素透過性ハードコンタクトレンズ用 酵素洗浄保存液

### 使用方法

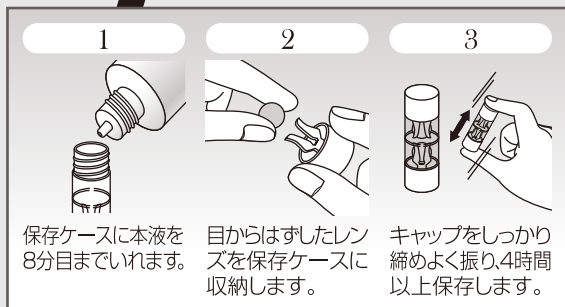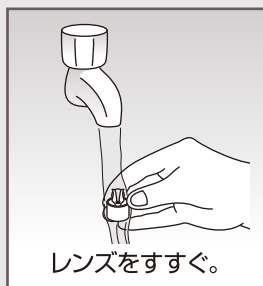

この形のレンズケースをご使用の方も、上記と同様の手順で使用していただけます。

## 使用上の注意

- レンズを取り扱う前に、手を石鹸等でよく洗ってください。
- ソフトレンズには使用できません。
- 誤って目や口に入ったときは、すぐに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。
- ケア用品等でアレルギー症状の経験がある方は、使用前に眼科医に相談してください。
- 万一、目や皮膚に異常を感じた場合は、使用を中止し眼科医の診断を受けてください。
- 使用後はキャップを締め、冷暗所に保管してください。
- 雑菌等の繁殖を防ぐため、容器の先端には触れないでください。
- 変質・変色したものは使用しないでください。
- 保存後のレンズすずぎが不完全だと、目に刺激を与えることもありますので注意してください。
- 一度使用した液は再使用しても効果がなく衛生上好ましくありません。本液は毎日新しい液と取り替えてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

## 保管及び取扱上の注意

- この使用説明書はよく読み保管しておいてください。
- 使用後はキャップを締め、冷暗所に保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。

## 使用方法の遵守に関する事項

- 使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

## 主成分

陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・タンパク分解酵素

**\* コンタクトレンズは高度管理医療機器です \***

コンタクトレンズに添付されている添付文書をよく読み、正しく安全にご使用ください。



**点眼・服用厳禁**

製造元

**株式会社 エイコー**

名古屋市西区則武新町二丁目22番3号

お客様相談窓口

**0120-288-102**

受付時間/平日(月~金) 9:00~17:30

<http://www.eiko-contact.com>



14.06作成 42191-02