

ハードクリアモイストケア 120mL (約1ヵ月分)

すべてのハードコンタクトレンズに
使用可能です

こんな方にオススメです

! 汚れが気になる

! ゴロゴロして、
装着感がよくない

! くもりやすい

! ケアを1本で完結させたい



商品特長

高い洗浄力を発揮

タンパク汚れはもちろん、脂質汚れに対して強力に
洗浄効果を発揮します。


うるおい+抗菌成分配合

うるおい成分配合でレンズと涙をなじみやすくし
ます。また、抗菌成分が保存中のレンズやケース
を清潔に保ちます。

主成分

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、タンパク分解酵素


使用方法

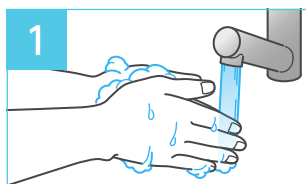


1 石鹼で念入りに手を洗
い、水道水でよくすす
いでからコンタクトレ
ンズを外します。



2 本液を保存ケースの
8分目まで入れます。
(レンズが汚れやすい場合
は、本液でこすり洗いを
行って下さい。)

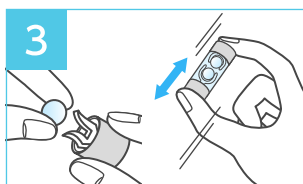

3 レンズホルダーにレン
ズを収納し、保存ケー
スに入れます。キャップを
しっかり締め、よく振り
4時間以上保存します。

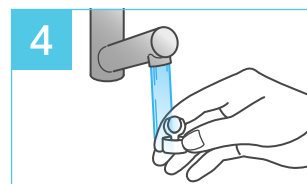

4 コンタクトレンズを装
着する際は、水道水で
よくすすいでから装用
します。

洗浄効果

脂質洗浄力

ハードコンタクトレンズに赤く
着色した脂質汚れを付着さ
せ、ハードクリアモイストケ
アに一晩つけおきしました。



↑脂質付着
レンズ

タンパク除去力

ハードコンタクトレンズにタン
パク汚れを付着させ、ハード
クリアモイストケアに一晩つ
けおき後、レンズに残ってい
るタンパクを染色しました。



↑タンパク質
付着レンズ