

Morning Drip!

うるおいは、朝いちばんの装着薬から。

目の表面に栄養を送っている涙。

睡眠中は供給できないため、

起床時は目が乾いています。

1日のはじまりに、うるおい補給を!

毎朝のコンタクトレンズ装着時に、

「レンズアシスト」を数滴。

ハードレンズの新習慣です。

涙とよくなじみ、
つけ心地ラクラク!

親水性の高い高分子

ポリビニルアルコール

乾燥を防ぐ
保湿成分

水分保持効果の高い成分

ヒプロメロース

「うるおいの素」
配合

角膜をやさしく保護する
なめらかな装用感

眼粘膜に作用し、角膜の保護に役立つ成分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

※粘稠化剤として配合

あきらめないで! ハードレンズのゴロゴロ感、はりつく乾き!

ハードレンズ特有の不快感や異物感を軽減。とろみ成分がクッションとなり、装着時の異物感を抑え、ラクラク装用を実現!

ハードコンタクトレンズ専用装着薬

レンズ アシスト

ハード O₂ハード

すべてのハードコンタクトレンズに使用できます



15mL

レンズに直接数滴落とすカンタン装着薬



1

コンタクトレンズ装着前に、
直接1~3滴落とします。



2

コンタクトレンズを
装着します。

レンズアシストがうるおいのベールになり、
汚れからもレンズをまもります。

汚れ付着防止



うるおいベール

※コンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。※本剤使用后、点眼薬を併用される場合、一時間経過後に点眼してください。

製造販売元
株式会社 エイコー

お客様相談窓口
☎0120-288-102
受付時間/平日(月~金) 9:00~17:30
<http://www.eiko-contact.com>