

なめらかなつけ心地を



# レンズ アシスト

15mL

ハード O<sub>2</sub>ハード

すべてのハードコンタクトレンズに使用できます

ハードコンタクトレンズ専用装着薬

## レンズアシスト使用説明書

(販売名: CMフィットIVA)

### ハードコンタクトレンズ専用装着薬

指定医薬部外品

- 使用前には、必ずこの使用説明書をよく読み、表現や内容等でわからないことがあれば必ず眼科医に相談し、よく確認してからご使用ください。
- 使用説明書は大切に保管してください。
- この使用説明書に記載された事項は必ずお守りください。
- 本剤使用により少しでも異常を感じたら、直ちに眼科医に相談してください。
- コンタクトレンズの取扱いについてはレンズの添付文書をよく読み、その使用方法などを守ってください。

### 使用方法の遵守に関する事項

使用方法及び使用上の注意等の内容を守り正しく使用しないと眼感染症等を生じ、重篤な場合には視力を失う可能性もあり得ますので、記載された事項は必ず守ってください。

### レンズアシストの特長

- レンズ表面の親水性を高め、くもりや汚れ付着を防止し、レンズを快適に装用することができます。  
「ポリビニルアルコール（部分けん化物）」配合 .....  
親水性が非常に高い高分子で、レンズ表面を涙液となじみやすくすることで、レンズの異物感を軽減します。  
「ヒプロメロース」配合 .....  
レンズの乾燥を防ぎ、うるおいのある快適な装用感を実現します。  
また、水分保持効果が高く、タンパク質や脂質等の汚れがレンズに付着しにくくなります。  
「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」配合 .....  
眼粘膜に作用し、角膜表層の保護に役立つ成分で、粘稠化剤として配合されています。また水分保持効果が高く、ヒプロメロースとダブルのうるおい効果により、なめらかなレンズの装用感が期待されます。
- すべてのハードコンタクトレンズに使えます。  
ハード、O<sub>2</sub>ハードにご使用いただけます。

## 使用上の注意

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 本人または家族がアレルギー体質の人。
  - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の症状のある人。… はげしい目の痛み
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談すること。  
使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	皮膚	目
症状	発疹・発赤、かゆみ	充血、かゆみ、はれ

※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常があらわれた場合には直ちに使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。特に、アレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用してください。

## 効能又は効果

ハードコンタクトレンズの装着を容易にする。

## 用法及び用量

本剤の1～3滴で、ハードコンタクトレンズの両面をぬらして装着すること。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 容器の先をコンタクトレンズ、指に触れさせないこと。また、混濁したものは使用しないこと。
- (3) コンタクトレンズを装着したまま使用しないこと。
- (4) ハードコンタクトレンズを装着するときのみ使用すること。
- (5) 用法・用量を厳守すること。

## 成分 1mL中

有効成分：ポリビニルアルコール（部分けん化物）…10mg、ヒプロメロース…10mg、塩化ナトリウム…5mg

添加物：D-ソルビトール、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、塩酸ポリヘキサニド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。

※本剤の容器は、透明フィルムで密封包装されています。  
フィルム破れ等の不審な点が見られた場合は、下記の製造販売元へご連絡ください。

製造販売元  
**株式会社 エイコー**  
名古屋市中村区竹橋町10-17

お客様相談窓口  
 **0120-288-102**  
受付時間 / 平日(月～金) 9:00～17:30  
<http://www.eiko-contact.com>