

# レンズアシスト 15mL

すべてのハードコンタクトレンズに使用可能です

## こんな方にオススメです

! ハードレンズの  
ゴロゴロ感が気になる

! コンタクトレンズを  
長時間装着する

! 瞳が乾燥しやすく、  
装着感がよくない

! 夕方になるとレンズが  
貼り付いた感じになる

! 目薬を頻繁にさしている

! 初めてコンタクトレンズを  
使用する



粘度 低 中 高

## 商品特長

### ハード特有の異物感を軽減

とろみ成分がクッションとなり、レンズ装着時の不快感や異物感を軽減します。

また、親水性高分子がレンズ表面を涙液となじみやすくし、快適なレンズ装着を実現します。

### 乾燥を防ぐ保湿成分

水分保持能力の高い水溶性高分子ヒプロメロースの配合により、レンズにうるおいを与え乾燥を防ぎます。また、涙液中のタンパク質や脂質などの汚れが、レンズに付着しにくくなります。

### コンドロイチン<sup>\*</sup>配合 <sup>\*</sup>粘稠化剤

角膜表層保護に役立つ成分のコンドロイチンを粘稠化剤として配合しています。水分保持効果も高く、なめらかなレンズの装着感が期待できます。


コンドロイチン : 眼粘膜に作用し、角膜表層の保護に役立ちます。

ヒプロメロース : 水分保持効果が高く、汚れの付着を防止します。

ポリビニルアルコール : レンズの水濡れ性を高める働きをします。

|       |                      |   |
|-------|----------------------|---|
| 販売名   | CMフィットIVA            |   |
| 効能・効果 | ハードコンタクトレンズの装着を容易にする |   |
| 成分    | 有効成分                 | ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ヒプロメロース、塩化ナトリウム  |
|       | 添加物                  | D-ソルビトール、エデト酸ナトリウム水和物、ホウ酸、ホウ砂、塩酸ポリヘキサニド、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム |


## 使用方法

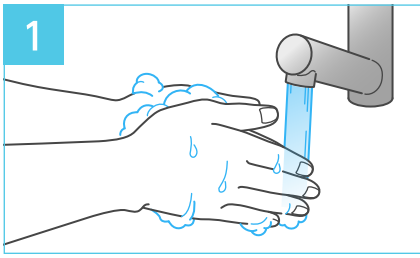

石鹸で念入りに手を洗い、水道水でよくすすぎます。



コンタクトレンズ装用前に装着薬を1~3滴落とし、両面になじませます。

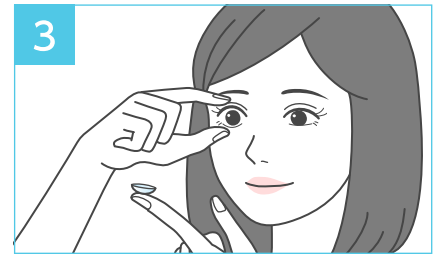

コンタクトレンズを装着します。

## 使用比較



## 目薬との違い

### 装着薬

レンズ装着前に使用することで、ゴロゴロ感、乾き、汚れ付着によるくもりを未然に防ぎます。また、目薬の回数を減らすことにもつながります。

レンズ装用前に直接つける “**予防策**”

### 目薬

点眼することで、レンズ装用中に発生した不快感や乾きを、一時的に解消します。

レンズ装用中の目に点眼する “**対処策**”