

スリムケア アルファ 500mL

すべてのソフトコンタクトレンズに使用可能です

こんな方にオススメです

! たっぷり使えるサイズのものがほしい

! 消毒時間を短縮させたい

! ゴロゴロして装用感がよくない…




商品特長

短時間 10分のクイック消毒

4時間かかっていたつけ置き時間を10分に短縮しました。洗浄成分が脂質汚れに働き、レンズへのタンパク汚れの付着も抑えます。

消毒時間を96%スリム化*

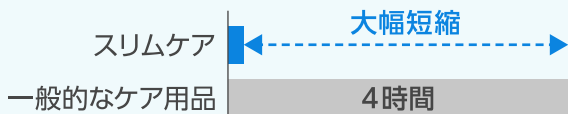

※本剤は正しい「こすり洗い」及び「すすぎ」を行うことで消毒効果を発揮します。本剤を使用の際には必ず指定された「こすり洗い」及び「すすぎ」を行ってください。

たっぷり使える大型サイズ


大切なレンズだから、惜しみないケアを! 大容量なのでたっぷり使用できます。また、レンズケースが2個入っており、ケースが汚れる前に交換できるので清潔に使えます。ケースをなくしてしまった時も安心です。持ち運びやカラコン用など使い分けにも活用できます。

販売名	ソフトシンプルワン
効能・効果	ソフトコンタクトレンズ (グループI~グループIV) の消毒

成分	有効成分	塩酸ポリヘキサニド
	配合成分	界面活性剤、緩衝剤、安定化剤、等張化剤、粘稠剤
	表示指定成分	エデト酸塩

※本剤はポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有しています。


使用方法

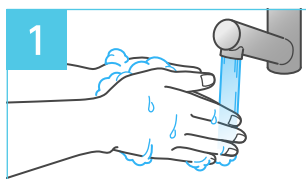


1 石鹸で念入りに手を洗い、水道水でよくすすぎます。



2 手のひらの上で本剤をレンズに数滴つけて、両面をそれぞれ20回以上ていねいにこすり洗います。

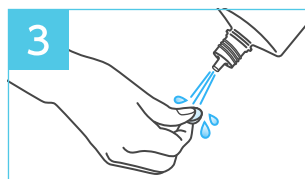

3 2で洗ったレンズの表面を本剤で10秒間以上、指先でこするようにしてすすぎます。

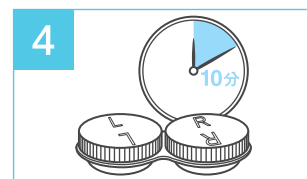

4 レンズケースに本剤を満たし、レンズを完全に浸します。蓋をしっかりと締めて10分間以上放置します。